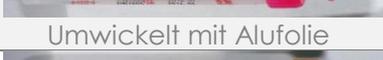
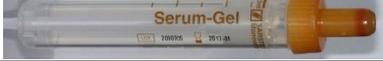
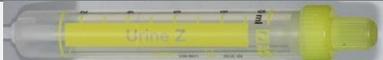
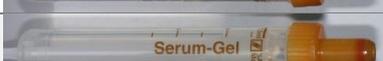
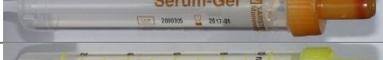


Sarstedt-Entnahmesystem

Profil	Zentrifugation		Material	Entnahme-Röhrchen
	ja/ nein	Zeitpunkt nach Blutabnahme		
Screening + Funktioneller Mikronähr- stoffstatus	ja	30 min	Serum mit Gel	
	nein		Li-Heparin	
	nein		2. Morgenurin	
	nein		EDTA	
Vitamine und Carotinoide	ja	sofort	EDTA-Plasma lichtgeschützt	 Umwickelt mit Alufolie
Fettsäuren	ja		Serum mit Gel	
Oxidativer Stress	ja	30 min	Serum mit Gel	
	nein		Li-Heparin	
	nein		2. Morgenurin	
Herz-Kreislauf	ja	30 min	Serum mit Gel	
Gewichts- management	ja	30 min	Serum mit Gel	
	ja	30 min	Serum gefroren	
Osteoporose	ja	Zentrifugation nicht zwingend	Serum mit Gel	
	nein		2. Morgenurin	
Foodprint	ja	Zentrifugation nicht zwingend	Serum mit Gel	
Nahrungs- mittelallergene	ja	Zentrifugation nicht zwingend	Serum mit Gel	
Inhalations- allergene	ja	Zentrifugation nicht zwingend	Serum mit Gel	
Aminosäure- profil	nein		EDTA	
Spurenelemente im Vollblut	nein		Li-Heparin	