




## Blutentnahme und Transport des QuantiFERON®-TB Gold Plus IT Test

### Blutentnahme


- **Neu: jetzt vier Röhrrchen für noch bessere Genauigkeit.**
- **Nicht direkt nach einer großen Mahlzeit, kleines Frühstück ist erlaubt.**
- **Nehmen Sie von jedem Patienten je 1 ml venöses Blut in jedes der vier QFT-Plus Blut-entnahmeröhrrchen.**

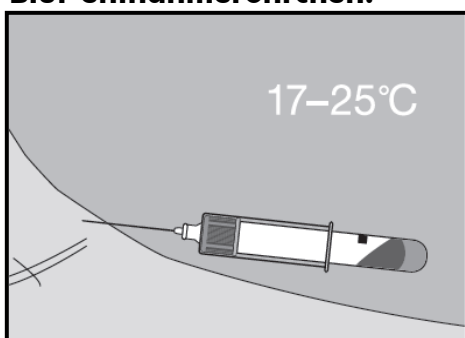

**Bei der Blutentnahme sollten die Röhrrchen eine Temperatur von 17-25 °C aufweisen.**

Da die 1-ml-Röhrrchen das Blut relativ langsam aufnehmen, belassen Sie das Röhrrchen nach dem scheinbaren Erreichen des Füllstands bitte noch **2-3 Sekunden** auf der Nadel. Wird bei der Blutentnahme die schwarze Markierungslinie am Rand des Etiketts nicht erreicht, entnehmen Sie bitte eine neue Blutprobe.

- **Unmittelbar nach dem Befüllen der Röhrrchen schwenken Sie diese bitte zehn Mal gerade fest genug, um sicherzustellen, dass die Innenwand der Röhrrchen ganz mit Blut bedeckt ist, damit sich die Antigene aus der Wandbeschichtung lösen können.**

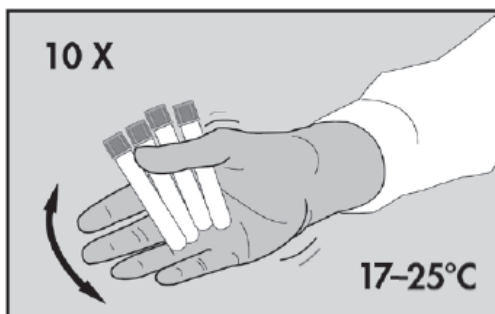

**Wichtig:**

Zu heftiges Schütteln kann den Gelpfropf zerstören und zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

- **Beschriften Sie alle vier Röhrrchen mit den Patientendaten (Name, Geburtsdatum).**

### Transport

- **Die Blutproben müssen schnellstmöglich (innerhalb von 16 Stunden nach der Blutentnahme) im auswertenden Labor bei 37 °C inkubiert werden!**
- **Senden Sie die Röhrrchen bei 17 – 27 °C ins Labor.**
- **Wenn längere Verzugszeiten unvermeidlich sind, kommt auch eine Bebrütung in der Praxis mit anschließender Zentrifugation in Frage. Bitte halten Sie Rücksprache mit dem Labor!**